


Consulte las instrucciones detalladas, las precauciones y las advertencias en el manual de funcionamiento del sistema ARIES® pertinente y en los prospectos de los análisis.

IVD Para uso diagnóstico in vitro.



Luminex Corporation
12212 Technology Boulevard
Austin, Texas 78727-6115
EE. UU.
Teléfono: 512-219-8020
Fax: 512-219-5195

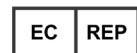

DiaSorin Italia S.p.A.
Via Crescentino snc
13040 Saluggia (VC) - Italia

Soporte técnico
Correo electrónico: support@luminexcorp.com
Teléfono: 512-381-4397
Gratuito: 1-877-785-2323
Internacional: +800-2939-4959

Guía rápida de los sistemas **ARIES®**
Número de pieza 89-00002-00-527 Rev. D
02/2023
Translated from English document 89-00002-00-508 Rev. D

Luminex Corporation (Luminex) se reserva el derecho a modificar sus productos y servicios en cualquier momento. Se enviarán notificaciones a los usuarios finales en relación con las modificaciones que afecten al uso, al funcionamiento y/o a la seguridad y efectividad del dispositivo. Toda modificación del dispositivo se llevará a cabo conforme a los requisitos reglamentarios vigentes. Luminex no asume responsabilidad alguna por cualesquiera daños que se puedan derivar de la aplicación no ajustada a las especificaciones o del uso indebido de esta información.

Luminex y ARIES son marcas comerciales de Luminex Corporation registradas en EE. UU. y otros países.

Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivas compañías.

Este producto o su uso están cubiertos, en su totalidad o en parte, por una o más de las patentes detalladas en la siguiente página, o bien para su elaboración se han aplicado procesos cubiertos por tales patentes: www.luminexcorp.com/patents.



Para obtener una copia de la ficha técnica de seguridad, vaya a:
www.luminexcorp.com.


© 2015 - 2023 Luminex Corporation. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, transmitir, transcribir o traducir a cualquier idioma o lenguaje informático, en forma alguna o por medio alguno sin el previo consentimiento expreso y por escrito de Luminex Corporation.

Guía rápida de los sistemas


ARIES®

Creación de un nuevo pedido

1. Vaya a **Order Management** (Gestión de pedidos) > **Sample Orders** (Pedidos de muestra).

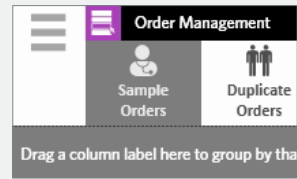

2. Seleccione **New Order** (Nuevo pedido) en la barra de acciones de la página.

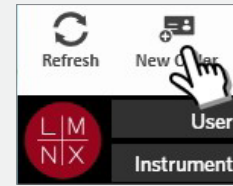

3. Escanee o introduzca la información del casete.



4. Escanee o introduzca la **Sample ID** (Identificación de muestra). Si es necesario, introduzca la **Accession ID** (Identificación de acceso) y el **Requisition Number** (Número de solicitud).



5. Seleccione o escanee **Save** (Guardar).




6. Ahora debería verse el pedido en la lista de la página **Sample Orders** (Pedidos de muestra).


Sample ID	Accession ID	Requisition Number	Sample Array	Sample Type	Server Name / Access Name	User	Order Control	Last Modified
Sample 7			LIMNIX_MIV_A313A_V2	Sample	D	admin	06/16/2015	
Control 1			LIMNIX_MIV_A313A_V2	Control	D	admin	06/16/2015	

Introducción de la información del casete

1. Vaya a **Order Management** (Gestión de pedidos) > **Sample Orders** (Pedidos de muestra).

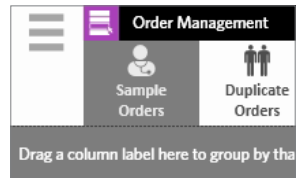


2. Escanee la **Sample ID** (Identificación de muestra) (el sistema busca automáticamente el pedido) o seleccione un pedido de la página **Sample Orders** (Pedidos de muestra).

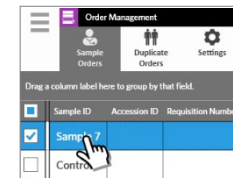


3. Escanee o introduzca la información del casete.



4. Seleccione **Edit Order** (Editar pedido) en la barra de acciones de la página.

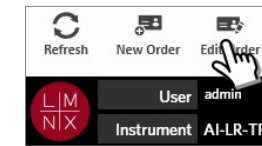

5. Escanee o introduzca la información del casete.

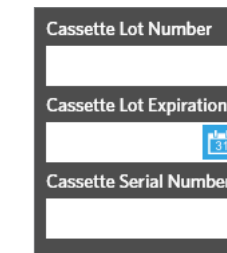


6. Seleccione o escanee **Save** (Guardar).



Inicio de un experimento

1. Introduzca el **User name** (Nombre de usuario) y la **Password** (Contraseña). Seleccione **Login** (Iniciar sesión).

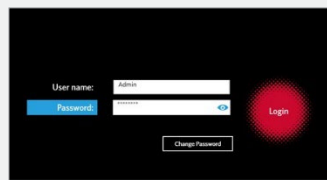

2. Cargue la muestra en el casete. **NOTA:** Algunos análisis requieren una fase de preprocesamiento. Consulte el prospecto.



3. Cargue el casete en el cambiador.




4. Cargue el cambiador en el instrumento **ARIES**.



5. El instrumento **ARIES** escanea automáticamente los casetes. **NOTA:** Si está activado Auto Run (Experimento automático), no es necesario continuar con el paso 6.




6. Si el escaneo es correcto, seleccione **Start Run** (Iniciar experimento) en la barra de acciones de la página.

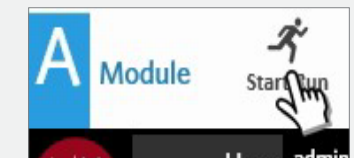

Visualización, impresión y exportación de los resultados después de un experimento


1. Para ver los resultados, vaya a la página **Results** (Resultados) > **Results** (Resultados).

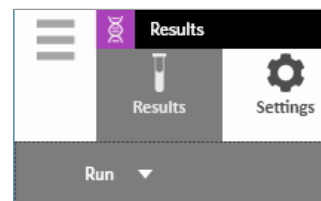


2. Para imprimir los resultados, seleccione un solo resultado de la página **Results** (Resultados).

Sample ID	Status	Location
AI-LR-TP1-E7064-Run#027-A (
Sample 1		A 1
Sample 2		A 2


3. Seleccione **Create Report** (Crear informe) en la barra de acciones de la página y elija un informe.

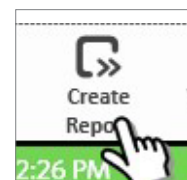

4. Una vez generado el informe, seleccione **Print Report** (Imprimir informe) en la barra de acciones de la página.

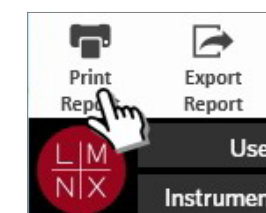

5. Para exportar el informe en PDF, seleccione **Export Report** (Exportar informe) en la barra de acciones de la página.

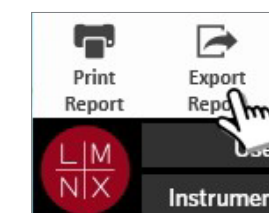

6. Seleccione la **Location** (Ubicación) para la exportación. Seleccione **OK** (Aceptar).

