



请参考《ARIES® 系统操作手册》和适用的实验程序说明书，了解有关说明、预防措施和警告的详细信息。

IVD 用于体外诊断。

Luminex Corporation
12212 Technology Boulevard
Austin, Texas 78727-6115
U.S.A.
电话：512-219-8020
传真：512-219-5195

技术支持
电子邮箱：support@luminexcorp.com
电话：512-381-4397
免费电话：1-877-785-2323
国际电话：+ 800-2939-4959

ARIES® 简易说明手册
PN 89-00002-00-542 修订版 A
2016 年 8 月
Translated from English document
89-00002-00-508 Rev. B

Luminex Corporation (简称 Luminex) 保留随时修改其产品和服务的权利。如果进行的更改会影响设备的使用、性能或安全性或有效性，将会向最终用户发送更改通知。对设备的任何修改都将遵照适用的法规要求进行。对于因滥用此信息或将其用于未标示的用途而造成的所有损害，Luminex 概不承担任何责任。

Luminex 和 ARIES 是 Luminex Corporation 的商标。

所有其他商标均为其各自公司的商标。

该产品本身或其使用的全部或部分，或其加工工艺受一项或多项专利保护：
www.luminexcorp.com/patents。

ARIES®


简易说明手册

Luminex 若要获取 SDS，请访问：www.luminexcorp.com

© 2016 Luminex Corporation. 保留所有权利。如事先未获得 Luminex Corporation 的明确书面许可，不得以任何形式或通过任何方式对本出版物的内容进行复制、传播、转录，或将其翻译为其他语言或计算机语言。

创建新实验

1. 导航到 **Order Management** (实验信息管理) > **Sample Orders** (样本实验)。

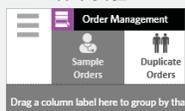


2. 在模块工作指令条上选择 **New Order** (新建实验)。



3. 扫描或输入卡盒信息。



4. 扫描或输入 **Sample ID** (样本 ID)。如果有要求, 请输入 **Accession ID** (准入 ID) 和 **Requisition Number** (请求单号)。

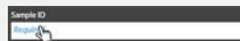

5. 选择或扫描 **Save** (保存)。



6. 您现在应该会看到该实验列于 **Sample Orders** (样本实验) 界面。



输入卡盒信息

1. 导航到 **Order Management** (实验信息管理) > **Sample Orders** (样本实验)。



2. 扫描 **Sample ID** (样本 ID), 系统会自动查找该实验, 或者从 **Sample Orders** (样本实验) 界面中选择一个实验。




3. 扫描或输入卡盒信息。




或者

4. 在模块工作指令条上选择 **Edit Order** (编辑实验)。

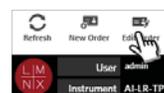

5. 扫描或输入卡盒信息。

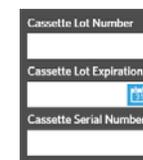


6. 选择或扫描 **Save** (保存)。



开始运行

1. 输入您的 **User name** (用户名) 和 **Password** (密码)。选择 **Login** (登录)。

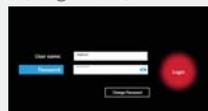

2. 将样本加入卡盒。
注意: 有些实验程序需要执行前处理步骤, 详情请参考说明书。



3. 将卡盒放入反应插槽。




4. 将反应插槽放入 **ARIES** 系统。



5. **ARIES** 系统会自动扫描卡盒。
注意: 如果启用了自动运行功能, 则无需继续执行第 6 步操作。




6. 如果扫描成功, 请在模块工作指令条上选择 **Start Run** (开始运行)。

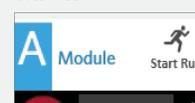

运行完成后查看、打印及导出结果


1. 要查看结果, 请导航到 **Results** (结果) > **Results** (结果) 界面。

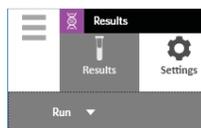

2. 要打印结果, 请在 **Results** (结果) 界面中选择单个结果。



3. 在模块工作指令条上选择 **Create Report** (创建报告), 然后选择某个报告。

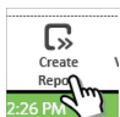

4. 报告生成后, 在模块工作指令条上选择 **Print Report** (打印报告)。



5. 要导出 PDF 格式的报, 请在模块工作指令条上选择 **Export Report** (导出报告)。



6. 选择存放导出文件的 **Location** (位置)。选择 **OK** (确定)。

