

Luminex® 200™ Addendum (IVD) (Tillæg til Luminex® 200™ (IVD))

Dette tillæg bør kun bruges sammen med nedenstående manualer:

- Brugermanual til Luminex® 200™ (89-00002-00-620 Rev. E)
- Brugermanual til Luminex® 200™-systemet (89-00002-00-463 Rev. D)
- Softwarebrugermanual til xPONENT® 4.2 til Luminex® 200™ (89-00002-00-456 Rev. C)
- Softwarebrugermanual til xPONENT® 3.1 Rev 2 til Luminex® 100/200™ (89-00002-00-255 Rev. D)

Med følgende opdateringer:

Advarsel om natriumazid



xMAP® Sheath Fluid PLUS (40-50035) indeholder, og andre laboratoriereagenser kan indeholde, natriumazid som konserveringsmiddel. Natriumazid kan reagere i forbindelse med bly- og kobberør og danne meget eksplosive metalsyrer. Se lokale retningslinjer og regler for korrekt bortskaffelse af ubrugte og brugte xMAP Sheath Fluid PLUS samt andre laboratoriereagenser, der indeholder dette konserveringsmiddel.

Advarsel om ProClin®



xMAP® Sheath Fluid (40-50000) og opløsningen, som mikrosfærerne opbevares i, indeholder ProClin®, hvilket kan forårsage en allergisk reaktion. Brug personlige værnemidler, herunder handsker og sikkerhedsbriller.

Varenummer tilføjet:

xMAP® Sheath Fluid PLUS, IVD: 40-50035



Til *in vitro*-diagnostisk brug.

89-00002-00-729 Rev. C

11/2022

Translated from English document

89-00002-00-715 Rev. C



DiaSorin Italia S.p.A.
Via Crescentino snc
13040 Saluggia (VC) –
Italien

Teknisk Support

Telefon: 512-381-4397

Gratis opkald i Nordamerika: 1-877-785-2323

Gratis internationalt opkald: + 800-2939-4959

E-mail: support@luminexcorp.com

www.luminexcorp.com



Luminex Corporation
12212 Technology Blvd.
Austin, Texas 78727
USA

© 2020-2022 Luminex Corporation, A DiaSorin Company. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må i nogen form eller på nogen måde gengives, transmitteres, omskrives eller oversættes til andre sprog eller computersprog uden forudgående udtrykkeligt og skriftligt samtykke fra Luminex Corporation.

Luminex, xPONENT, og xMAP er varemærker tilhørende Luminex Corporation, der er registreret i USA og andre lande. 100/200 er et varemærke tilhørende Luminex Corporation. Alle andre varemærker er varemærker, der tilhører de respektive selskaber.

Luminex Corporation (Luminex) forbeholder sig ret til når som helst at ændre sine produkter og serviceydelser. Brugeren vil få meddelelse om ændringer, der har betydning for apparatets brug, ydelse og/eller sikkerhed og effektivitet. Alle ændringer af enheden vil blive foretaget i overensstemmelse med gældende lovgivning. Luminex påtager sig ikke noget ansvar for skader som følge af brug i strid med mærkningen eller misbrug af disse oplysninger.

Dette produkt eller brugen af det er helt eller delvist omfattet af eller fremstillet gennem processer, der er omfattet af én eller flere af følgende patenter: www.luminexcorp.com/patents.