

Résumé et utilisation

Le liquide MAGPIX Drive Fluid (MPXDF-4PK-1, 40-50014) sert de solution de distribution et de rinçage pour le transport de l'échantillon jusqu'aux composants optiques des instruments fonctionnant avec MAGPIX.

Ingrédients

Le liquide MAGPIX Drive Fluid contient du chlorure de sodium, du phosphate de sodium et un antimicrobien en solution aqueuse.

Mesures de sécurité

Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Une fiche de données de sécurité peut être obtenue sur demande.

Limitations

Les instructions de la présente fiche d'information de produit doivent être respectées. La fiabilité des résultats ne peut être garantie en cas de non-respect de ces instructions. S'il est entreposé à une température comprise entre 15 °C et 30 °C, le produit devrait conserver ses propriétés jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette du récipient.

Stockage du produit

Conservez à une température comprise entre 15 °C et 30 °C. Ne congelez pas.

Procédure

Ouvrez le carton du liquide Drive Fluid. Ouvrez le compartiment des liquides de l'instrument MAGPIX, retirez la bouteille de liquide Drive Fluid vide et éliminez-la correctement. Insérez partiellement la nouvelle bouteille de liquide Drive Fluid dans le compartiment, puis saisissez fermement la languette d'étanchéité tout en maintenant la bouteille et retirez l'opercule en aluminium. Étirez la tubulure du liquide Drive Fluid du compartiment des liquides et insérez avec précaution le bouchon dans le goulot de la bouteille de liquide Drive Fluid en veillant à ce que la tubulure soit directement orientée vers le bas, dans le renforcement de la bouteille. Faites glisser la bouteille de liquide Drive Fluid en place à l'intérieur du compartiment. La bouteille doit s'adapter dans les renforcements du plateau. Vérifiez que le récipient à déchets est vide. Amorcez l'appareil conformément aux instructions du manuel d'utilisation.

Consultez le manuel d'utilisation du système pour utiliser correctement le liquide MAGPIX Drive Fluid en fonction de l'application. Pour toute information, contactez l'assistance technique ou allez sur le site

https://oraweb.luminexcorp.com/OA_HTML/jtflogin.jsp.

REF

Référence
MPXDF-4PK-1
Quantité : 4 x 700 ml
40-50014
Quantité : 2 x 700 ml



Luminex Corporation
12212 Technology Blvd.
Austin, Texas 78727 USA
www.luminexcorp.com

EC REP

WMDE
Bergerweg 18
6085 AT Horn
The Netherlands

**IVD***Service d'assistance technique :*

Appelez le : 877-785-2323 (depuis les États-Unis et le Canada)
+80029394959 ou +1 512-381-4397 (international)
Télécopieur : 512-219-0544
Courriel : support@luminexcorp.com

Pour commander davantage de produit :

Numéro de réapprovisionnement : MPXDF-4PK-1

Courriel : orders@luminexcorp.com or
Télécopieur : 512-219-0544 ou
Page Web de Luminex : www.luminexcorp.com

