

Sommario e utilizzo previsto

Usare MAGPIX Drive Fluid (MPXDF-4PK-1, 40-50014) come mezzo di fornitura e di lavaggio per trasferire il campione nel componente ottico degli strumenti basati su MAGPIX.

Ingredienti

MAGPIX Drive Fluid contiene cloruro di sodio, fosfato di sodio e un antimicrobico in soluzione acquosa.

Precauzioni relative alla sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Su richiesta è disponibile una scheda sulla sicurezza del materiale.

Limitazioni

Attenersi alle istruzioni fornite nella presente scheda informativa sul prodotto. L'affidabilità dei risultati non può essere garantita in caso di mancata osservanza delle presenti istruzioni. Se conservato a una temperatura compresa tra 15 e 30 °C, il prodotto mantiene la stabilità fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta del contenitore.

Conservazione del prodotto

Conservare a una temperatura compresa tra 15 e 30 °C. Non congelare.

Procedura

Aprire la scatola di Drive Fluid. Aprire il comparto del liquido dello strumento MAGPIX, quindi rimuovere la bottiglia vuota di Drive Fluid e smaltirla correttamente. Inserire parzialmente la nuova bottiglia di Drive Fluid, afferrare saldamente la linguetta di tenuta tenendo contemporaneamente la bottiglia e rimuovere la lamina di tenuta. Prolungare il tubo del Drive Fluid dal comparto del liquido e inserire con cautela il tappo nell'apertura della bottiglia di Drive Fluid, assicurandosi che il tubo punti diritto verso la tacca della bottiglia. Posizionare correttamente la bottiglia di Drive Fluid nel comparto. La bottiglia deve inserirsi nelle tacche della vaschetta. Verificare che il contenitore di rifiuti sia vuoto. Preparare l'unità secondo le istruzioni del manuale dell'utente.

Per un utilizzo corretto di MAGPIX Drive Fluid, consultare il manuale dell'utente del sistema. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza tecnica o visitare il sito Web https://oraweb.luminexcorp.com/OA_HTML/jtlogin.jsp.

REF

Prodotto n.
MPXDF-4PK-1
Quantità: 4 x 700 ml
40-50014
Quantità: 2 x 700 ml



Luminex Corporation
12212 Technology Blvd.
Austin, Texas 78727 USA
www.luminexcorp.com

EC REP

WMDE
Bergerweg 18
6085 AT Horn
The Netherlands

CE**IVD***Per assistenza tecnica:*

Tel: 877-785-2323 (USA e Canada)
+80029394959 o +1 512-381-4397 (dall'estero)
Fax: 512-219-0544
e-mail: support@luminexcorp.com

Per ordinare più prodotto:

Numero di riordine: MPXDF-4PK-1
e-mail: orders@luminexcorp.com o
Fax: 512-219-0544 o
Sito Luminex: www.luminexcorp.com

