

Zusammenfassung und Verwendungszweck

Verwenden Sie MAGPIX Drive Fluid (MPXDF-4PK-1, 40-50014) als Transport- und Spülmittel, um die Probe auf die optische Komponente der auf MAGPIX basierenden Geräte zu leiten.

Bestandteile

Das MAGPIX Drive Fluid enthält Natriumchlorid, Natriumphosphat und eine antimikrobielles Substanz in Wasser.

Vorsichtsmaßnahmen

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen. Auf Anfrage ist ein Material Sicherheitsdatenblatt verfügbar.

Einschränkungen

Die Anweisungen dieses Produktbeipackzettels müssen befolgt werden. Bei einer Abweichung von diesen Anweisungen wird die Zuverlässigkeit von Ergebnissen nicht garantiert. Bei einer Lagerung zwischen 15 °C und 30 °C sollte die zu erwartende Leistungsfähigkeit des Produkts bis zu dem auf dem Etikett des Behälters aufgedruckten Verfalldatums gegeben sein.

Produktlagerung

Bei 15 °C bis 30 °C lagern. Nicht einfrieren.

Verfahren

Öffnen Sie den Karton des Drive Fluid. Öffnen Sie das Flüssigkeitsfach des MAGPIX Geräts, entnehmen Sie die leere Drive Fluid-Flasche und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß. Schieben Sie die neue Drive Fluid-Flasche ein Stück weit hinein. Halten Sie die Flasche fest, ergreifen Sie mit festem Griff die Siegelasche und entfernen Sie das Foliensiegel. Entnehmen Sie den Drive Fluid-Schlauch aus dem Flüssigkeitsfach und setzen Sie den Stöpsel vorsichtig in die Öffnung der Drive Fluid-Flasche ein. Achten Sie darauf, dass der Schlauch gerade in den Flaschenhals hineinreicht. Setzen Sie die Drive Fluid-Flasche wieder in das Fach ein. Die Flasche sollte in die Ausbuchtung des Tablett hineinpasse. Überprüfen Sie, ob der Abfallbehälter leer ist. Spülen Sie die Einheit gemäß den Anweisungen im Bedienungshandbuch.

Anweisungen für eine ordnungsgemäße Verwendung des MAGPIX Drive Fluid sind im Bedienungshandbuch des Systems zu finden. Weitere Informationen erhalten Sie vom technischen Kundendienst oder auf unserer Website unter https://oraweb.luminexcorp.com/OA_HTML/jtflogin.jsp.

REF

Produkt-Nr.
MPXDF-4PK-1
Menge: 4 x 700 ml
40-50014
Menge: 2 x 700 ml



Luminex Corporation
12212 Technology Blvd.
Austin, Texas 78727, USA
www.luminexcorp.com

EC REP

WMDE
Bergerweg 18
6085 AT Horn
The Netherlands

*Technischer Kundendienst:*

Telefon: 877-785-2323 (USA und Kanada)
+80029394959 oder +1 512-381-4397 (International)
Fax: 512-219-0544
E-Mail: support@luminexcorp.com

Nachbestellungen:

Nachbestellungsnummer: MPXDF-4PK-1

E-Mail: orders@luminexcorp.com oder
Fax: 512-219-0544 oder
Luminex Internetseite: www.luminexcorp.com

