

Resumen y uso previsto

Utilice el fluido de transmisión MAGPIX (MPXDF-4PK-1, 40-50014) como medio de entrega y vaciado para transportar la muestra al componente óptico de los instrumentos basados en MAGPIX.

Ingredientes

El fluido de transmisión MAGPIX contiene cloruro sódico, fosfato sódico y un antimicrobiano en agua.

Precauciones de seguridad

Evite el contacto con la piel y los ojos. Si lo solicita se le entregará una ficha técnica de seguridad de materiales.

Limitaciones

Debe seguir las instrucciones de esta hoja de información de producto. No se puede garantizar la fiabilidad de los resultados si no sigue exactamente las instrucciones. Cuando se almacena entre 15 °C y 30 °C, el producto debería actuar del modo previsto hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del contenedor.

Almacenamiento del producto

Almacene el producto a una temperatura de 15 °C a 30 °C. No lo congele.

Procedimiento

Abra el embalaje del fluido de transmisión. Abra el compartimento para fluidos del instrumento MAGPIX, retire la botella de fluido de transmisión vacía y deséchela según las normas. Inserte parcialmente la nueva botella, agarre con firmeza la lengüeta del precinto mientras sujeta la botella y retire el precinto de aluminio. Extienda la línea del fluido de transmisión desde el compartimento para fluidos e inserte con cuidado el tapón en la abertura de la botella de fluido de transmisión procurando que la línea apunte hacia abajo justo en la marca de la botella. Introduzca la botella dentro del compartimento. La botella debe ajustarse a las marcas de la bandeja. Verifique que el contenedor de residuos está vacío. Cebe la unidad siguiendo las instrucciones del manual del usuario del sistema.

Consulte el manual del usuario del sistema para obtener información sobre el uso correcto del fluido de transmisión MAGPIX. Si desea información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica o visite el sitio web https://oraweb.luminexcorp.com/OA_HTML/jtflogin.jsp.

REF

Nº de producto
MPXDF-4PK-1
Cantidad: 4 x 700 ml
40-50014
Cantidad: 2 x 700 ml



Luminex Corporation
12212 Technology Blvd.
Austin, Texas 78727 USA
www.luminexcorp.com

EC REP

WMDE
Bergerweg 18
6085 AT Horn
The Netherlands

CE**IVD***Para asistencia técnica:*

Tel: 877-785-2323 (EE. UU. y Canadá)
+80029394959 o +1 512-381-4397
(llamadas internacionales)
Fax: 512-219-0544
Correo electrónico: support@luminexcorp.com

Para pedir más producto:

Número para nuevos pedidos: MPXDF-4PK-1
Correo electrónico: orders@luminexcorp.com o
Fax: 512-219-0544 o
Página web de Luminex: www.luminexcorp.com

