

Fluido de Transmissão Hidrodinâmica MAGPIX[®] - Diagnóstico In Vitro**Resumo e Utilização Prevista**

Utilize o Fluido de Transmissão Hidrodinâmica MAGPIX (MPXDF-4PK-1, 40-50014) como meio de fornecimento e irrigação, para transportar a amostra para o componente óptico dos instrumentos de base MAGPIX.

Ingredientes

O Fluido de Transmissão Hidrodinâmica MAGPIX contém cloreto de sódio, fosfato de sódio e um agente antimicrobiano em água.

Precauções de Segurança

Evite o contacto com a pele e os olhos. Uma Ficha de Dados de Segurança do Material encontra-se disponível, a pedido.

Limitações

Tem de seguir as instruções constantes desta folha de informações do produto. A fiabilidade dos resultados não pode ser garantida caso não cumpra rigorosamente estas instruções. Quando armazenado entre 15°C e 30°C, o produto deverá apresentar o desempenho esperado até à data de validade indicada no rótulo do recipiente.

Armazenamento do Produto

Armazene entre 15°C e 30°C. Não congele.

Procedimento

Abra a embalagem do Fluido de Transmissão Hidrodinâmica. Abra o compartimento de fluido do instrumento MAGPIX, retire a garrafa de fluido de transmissão hidrodinâmica e descarte-a adequadamente. Insira parte da nova garrafa de fluido de transmissão hidrodinâmica e segure firmemente na patilha do vedante enquanto segura a garrafa e retira o vedante. Estenda o tubo do fluido de transmissão hidrodinâmica a partir do compartimento do fluido e insira cuidadosamente o tampão na garrafa de fluido de transmissão hidrodinâmica, certificando-se de que o tubo fica virado directamente para baixo, na direcção da ranhura da garrafa. Empurre a garrafa de fluido de transmissão hidrodinâmica para dentro do compartimento. A garrafa deverá encaixar nas ranhuras existentes no tabuleiro. Certifique-se de que o recipiente de resíduos está vazio. Escorve a unidade seguindo as instruções constantes do Manual do Utilizador.

Consulte no manual do utilizador do sistema a utilização adequada do Fluido de Transmissão Hidrodinâmica MAGPIX, conforme aplicável. Contacte a assistência técnica para obter informações ou aceda ao website em https://oraweb.luminexcorp.com/OA_HTML/jtflogin.jsp.

REF

Ref. do produto
MPXDF-4PK-1
Quantidade: 4 x 700 ml
40-50014
Quantidade: 2 x 700 ml



Luminex Corporation
12212 Technology Blvd.
Austin, Texas 78727 USA
www.luminexcorp.com

EC REP

WMDE
Bergerweg 18
6085 AT Horn
The Netherlands

*Para obter assistência técnica:*

Contacte: 877-785-2323 (EUA e Canadá)
+80029394959 ou +1 512-381-4397 (Internacional)
Fax: 512-219-0544
E-mail: support@luminexcorp.com

Para encomendar mais produto:

Referência para nova encomenda: MPXDF-4PK-1

E-mail: orders@luminexcorp.com ou
Fax: 512-219-0544 ou
Página web da Luminex:
www.luminexcorp.com

