

**Beskrivning och avsedd användning**

Använd MAGPIX-drivvätska (MPXDF-4PK-1, 40-50014) som överförings- och spolningsmedel för att överföra provet till optikkomponenterna i MAGPIX-baserade instrument.

**Ingredienser**

MAGPIX-drivvätska innehåller natriumklorid, natriumfosfat och ett antimikrobiellt medel i vatten.

**Säkerhetsföreskrifter**

Undvik kontakt med huden och ögonen. Ett säkerhetsdatablad tillhandahålls på begäran.

**Begränsningar**

Du måste följa instruktionerna på produktbladet. Resultatets tillförlitlighet kan inte garanteras om du avviker från dessa instruktioner. När produkten lagras vid 15 °C till 30 °C bör dess prestanda vara den förväntade upp till utgångsdatumet på behållarens etikett.

**Produktförvaring**

Förvaras vid 15 °C - 30 °C. Får ej frysas.

**Procedur**

Öppna förpackningen med drivvätska. Öppna MAGPIX-instrumentvätskefacket och avlägsna den tomma drivvätskeflaskan och kassera på lämpligt sätt. Skjut in den nya drivvätskeflaskan delvis och fatta sedan ordentligt tag i tätningsfliken medan du håller i flaskan och avlägsna folietätningen. Dra ut drivvätskeslangen från vätskefacket och stick försiktigt in pluggen i drivvätskeflaskan öppning medan du säkerställer att slangen är riktad helt ner in i flaskurtaget. Skjut drivvätskeflaskan på plats inne i facket. Flaskan bör passa in i urtagen på bricken. Kontrollera att avfallsbehållaren är tom. Prima enheten enligt anvisningarna i systemets användarhandbok.

Du hänvisas i tillämpliga fall till systemets användarhandbok för riktig användning av MAGPIX-drivvätska. Kontakta den tekniska supportavdelningen för information eller åtkomst till webbplatsen på

[https://oraweb.luminexcorp.com/OA\\_HTML/jtflogin.jsp](https://oraweb.luminexcorp.com/OA_HTML/jtflogin.jsp).

REF

Produktnr  
MPXDF-4PK-1  
Mängd: 4 x 700 ml  
40-50014  
Mängd: 2 x 700 ml



Luminex Corporation  
12212 Technology Blvd.  
Austin, Texas 78727 USA  
[www.luminexcorp.com](http://www.luminexcorp.com)

EC REP

WMDE  
Bergerweg 18  
6085 AT Horn  
The Netherlands

CE

IVD

*För teknisk support:*

Ring: 877-785-2323 (endast inom USA och Kanada)  
+80029394959 eller +1 512-381-4397  
(internationellt)  
Fax: 512-219-0544  
E-post: [support@luminexcorp.com](mailto:support@luminexcorp.com)

*För beställa mer produkt:*

Beställningsnummer: MPXDF-4PK-1

E-post: [orders@luminexcorp.com](mailto:orders@luminexcorp.com) or  
Fax: 512-219-0544 eller  
Luminex webbsida: [www.luminexcorp.com](http://www.luminexcorp.com)

