

# MAGPIX® Drive Fluid (ajamivedelik) toote teabeleht



## Kokkuvõte

MAGPIX® Drive Fluid (ajamivedelik) (40-50014) on mõeldud kasutamiseks edastus- ja loputusvahendina, mis kannab optilise komponendiproovi MAGPIX instrumentideni.

## Ohutusabinõud

Vältige kokkupuudet naha ja silmadega. Ohutuskaardid (SDS) on soovi korral kättesaadavad.

## Koostisosad

MAGPIX® Drive Fluid (ajamivedelik) sisaldab järgmist: naatriumkloriid, naatriumfosfaat ning antimikroobikum vees.

## Toote hoiustamine

Toodet peab säilitama temperatuuril alates +15°C kuni +30°C. Toodet ei tohi külmutada.

## Piirangud

Järgida tuleb tootekirjelduses esitatud juhiseid. Tulemuste usaldusväärsust ei ole võimalik garanteerida juhul, kui kõnealuseid juhiseid täies ulatuses ei täideta. Toote efektiivsus on tagatud pakendi etiketil esitatud kuupäevani juhul, kui seda hoiustatakse temperatuuril alates +15°C kuni +30°C.

## Protseduur

1. Avage ajamivedeliku karp. Avage MAGPIX® instrumendi vedelikumahuti ja eemaldage tühi ajamivedeliku pudel ning kõrvaldage see vastavalt nõuetele.
2. Libistage uus ajamivedeliku pudel sisse, seejärel hoidke pudelit ning võtke tihendiosast tugevalt kinni ja eemaldage pitsat.
3. Võtke ajamivedeliku toru vedelikumahutist välja ning sisestage kork hoolikalt ajamivedeliku pudeli avale, tagades toru suuna pudeli süvendist otse alla.
4. Asetage ajamivedeliku pudel kambri sees paika. Pudel peab mahtuma aluse süvenditesse. Veenduge, et prügikast on tühi.
5. Seadke üksus kasutusjuhendit järgides töökorda.

**MÄRKUS.** Soovi korral on toote teabelehed saadaval ka teistes keeltes. Küsimuste korral võtke ühendust tehniliste tugiteenusteportaaliga või külastage veebilehte <http://www.luminexcorp.com>. Seejärel kasutage soovitud toote teabelehe leidmiseks otsingufunktsiooni.

MAGPIX Drive Fluid (ajamivedelik) nõuetekohaseks kasutamiseks tutvuge kasutusjuhendiga.

89-60000-00-166, väljaanne A  
5/2020

Translated from English document  
89-60000-00-172 Rev A



Toote number: 40-50014

Kogus: 2 x 700 ml

Toote juurde tellimiseks:  
E-posti aadress: [orders@luminexcorp.com](mailto:orders@luminexcorp.com)  
Faks: 512-219-0544

© 2020 Luminex Corporation

## Tehnilised tugiteenused

Telefon: 512-381-4397

Põhja-Ameerika (maksuvaba): 1-877-785-2323

Rahvusvaheline (maksuvaba): + 800-2939-4959

E-posti aadress: [support@luminexcorp.com](mailto:support@luminexcorp.com)

[www.luminexcorp.com](http://www.luminexcorp.com)



**Luminex Corporation**

12212 Technology Blvd.

Austin, TX 78727

U.S.A.

**Luminex**

complexity simplified.