










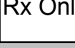


MAGPIX® Drive Fluid 4 Pack (4-pakning med drivvæske) Produktinformasjonsark

Sammendrag og tiltenkt bruk

Bruk MAGPIX®-drivvæske (MPXDF-4PK-1) som leverings- og skyllemedium, altså det som inneholder prøven når den overføres til den optiske komponenten i de MAGPIX-baserte instrumentene.

Symbolordliste

5.1.6* 	Katalognummer. Angir produsentens katalognummer, slik at den medisinske enheten kan identifiseres.	5.1.5* 	Batchkode. Angir produsentens batchkode, slik at batch eller lot kan identifiseres.	5.5.1* 	Medisinsk utstyr for <i>In vitro</i> -diagnostikk. Angir en medisinsk enhet som skal brukes som en medisinsk enhet til <i>in vitro</i> -diagnostikk.
5.4.3* 	Se informasjonen som gis i bruksanvisningen. Angir at brukeren må se i bruksanvisningen.	5.1.4* 	Holdbarhetsdato. Angir siste dato for bruk av den medisinske enheten.	5.3.7* 	Temperaturgrense. Angir hvilke temperaturgrenser den medisinske enheten trygt kan utsettes for.
5.4.4* 	Forsiktig. Angir at brukeren må se i bruksanvisningen for viktig sikkerhetsinformasjon som advarsler og forsiktighetsregler, som av ulike årsaker ikke kan angis direkte på den medisinske enheten.	5.1.1* 	Produsent. Angir produsenten av den medisinske enheten iht. EU-direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF.	5.1.2* 	Autorisert representant i EU. Angir autorisert representant i EU.
5.5.5* 	Inneholder nok til <n> tester. Angir det totale antallet IVD-tester som kan utføres med IVD.	## 	Conformite Europeenne (CE-samsvarsmerking i EU) CE-samsvarsmerking		Forsiktig: Ifølge føderal lov er det bare leger med lisens som kan selge eller foreskrive denne enheten (kun USA).

* ANSI/AAMI/ISO 15223-1:2016, Medical devices—Symbols to be used with medical device labels, labeling, and information to be supplied—Part 1: General requirements.

† Council Directive 98/79/EC on In Vitro Diagnostic Medical Devices (IVDMD) (1998)

‡ ST/SG/AC.10/30/Rev.7 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), Seventh revised edition

§ 21 CFR 809 (FDA Code of Federal Regulations).

Sikkerhetsforholdsregler

Unngå kontakt med hud og øyne. Et sikkerhetsdatablad (SDS) er tilgjengelig på forespørsel.

Ingredienser

MAGPIX® drivvæske inneholder natriumklorid, natriumfosfat og et antimikrobielt stoff i vann.

Oppbevaring av produktet

Oppbevares ved 15–30 °C. Må ikke fryses.

Begrensninger

Du må følge instruksjonene i dette produktinformasjonsarket. Vi kan ikke garantere påliteligheten til resultatene hvis du avviker fra disse instruksjonene. Når produktet oppbevares ved 15 °C til 30 °C, bør det yte som forventet frem til utløpsdatoen på emballasjen.

MAGPIX® Drive Fluid 4 Pack (4-pakning med drivvæske) Produktinformasjonsark



Fremgangsmåte

1. Åpne esken med drivvæsken. Åpne væskebeholderen på MAGPIX®-instrumentet og fjern den tomme drivvæskeflasken og kast den på forsvarlig vis.
2. Skyv den nye flaskedelen inn, hold fast flasken og ta godt tak i forseglingen og riv den av.
3. Strekk ut drivvæskeslangen fra væskebeholderen og sett pluggen godt inn i åpningen på drivvæskeflasken. Sørg for at slangen peker rett ned mot forhøyningen i bunnen av flasken.
4. Skyv drivvæskeflasken på plass inne i beholderen. Flasken skal passe inn i sporene på brettet. Kontroller at avfallsbeholderen er tom.
5. Prime enheten i tråd med instruksjonene i brukerhåndboken.

Produktinformasjonsarkene er tilgjengelig på andre språk på forespørsel. Kontakt Luminex' tekniske støtte for informasjon eller gå til nettsiden vår <http://www.luminexcorp.com>. Der kan du bruke søkefunksjonen til å søke etter ønsket produktinformasjonsark. Se i brukerhåndboken for korrekt bruk av MAGPIX drivvæske ved behov.


IVD For bruk i *in vitro*-diagnostikk.
89-60000-00-194 Rev. A
6/2020

Translated from English document
89-60000-00-084 Rev B

REF Produktnr. MPXDF-4PK-1
Mengde: 4 x 700 ml

For bestilling:
E-post: orders@luminexcorp.com
Faks: 512-219-0544

© 2010-2020 Luminex Corporation

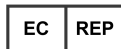

WMDE B.V.
Bergerweg 18
6085 AT Horn
Nederland

Teknisk støtte

Telefon: 512-381-4397
Gratis nummer i Nord-Amerika: 1-877-785-2323
Gratis nummer fra andre land: + 800-2939-4959
E-post: support@luminexcorp.com
www.luminexcorp.com



Luminex Corporation

12212 Technology Blvd.
Austin, TX 78727
USA