













# MAGPIX® Drive Fluid 4 Pack (ajamivedeliku nelipakk) Tooteteabeleht

## Kokkuvõte ja kasutusotstarve

MAGPIX® Drive Fluid (ajamivedelik) (MPXDF-4PK-1) on mõeldud kasutamiseks edastus- ja loputusvahendina, mis kannab optilise komponendiproovi MAGPIX instrumentideni.
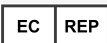
## Sümbolite loend

5.1.6* 	Katalooginumber. Tähistab tootja katalooginumbrit, millega saab meditsiiniseadme tuvastada.	5.1.5* 	Partii number. Tähistab tootja partii numbrit, millega saab tuvastada partii või pakendi.	5.5.1* 	<i>In Vitro</i> diagnostiline meditsiiniseade. Tähistab meditsiiniseadmed, mis on mõeldud kasutamiseks meditsiiniliste in vitro diagnostikavahenditena.
5.4.3* 	Tutvuge kasutusjuhendiga. Tähistab kasutaja jaoks vajadust tutvuda kasutusjuhendiga.	5.1.4* 	Tarvitamise lõpptähtpäev. Tähistab kuupäeva, peale mida ei tohi meditsiiniseadet enam kasutada.	5.3.7* 	Temperatuuri vahemik. Tähistab temperatuuri vahemikku, mis on meditsiiniseadme kasutamiseks ohutu.
5.4.4* 	Ettevaatusabinõu. Tähistab kasutaja jaoks vajadust tutvuda kasutusjuhendis olulise ettevaatusteabega, nagu hoiatused ja abinõud, mida ei saa mitmetel põhjustel esitada meditsiiniseadmel endal.	5.1.1* 	Tootja. Tähistab meditsiiniseadme tootjat, nagu on määratletud EL-i direktiivides 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ ja 98/79/EÜ.	5.1.2* 	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses. Tähistab volitatud esindajat Euroopa Ühenduses.
5.5.5* 	Sisaldab piisavalt <n-arvu> testide jaoks Tähistab IVD-testide koguarvu, mida saab IVD-ga teha.	## 	Conformite Europeenne (EL-i CE-vastavusmargis) CE-vastavusmargis	Rx Only 	Ettevaatusabinõu. Föderaalseadus lubab seda seadet müüa ainult litsentseeritud kasutajal või tema loal (ainult USA).

\* ANSI/AAMI/ISO 15223-1:2016, Meditsiiniseadme märgisel, märgistamisel ning kaasavas teabes kasutatavad sümbolid. Osa 1: Üldnõuded.

† nõukogu 1998. aasta direktiiv 98/79/EÜ meditsiiniliste in vitro diagnostikavahendite kohta

‡ ST/SG/AC.10/30/Red.7 ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem (GHS), seitsmes muudetud versioon

§ 21 CFR 809 (FDA Code of Federal Regulations).

## Ohutusabinõud

Vältige kokkupuudet naha ja silmadega. Ohutuskaardid (Safety Data Sheet, SDS) on soovi korral kättesaadavad.

## Koostisosad

MAGPIX® Drive Fluid (ajamivedelik) sisaldab järgmist: naatriumkloriid, naatriumfosfaat ning antimikroobikum vees.

## Toote hoiustamine

Toodet peab säilitama temperatuuril alates +15°C kuni +30°C. Toodet ei tohi külmutada.

## Piirangud

Järgida tuleb tootekirjelduses esitatud juhiseid. Tulemuste usaldusväärsust ei ole võimalik garanteerida juhul, kui kõnealuseid juhiseid täies ulatuses ei täideta. Toote efektiivsus on tagatud pakendi etiketil esitatud kuupäevani juhul, kui seda hoiustatakse temperatuuril alates +15°C kuni +30°C.

# MAGPIX® Drive Fluid 4 Pack (ajamivedeliku nelipakk) Tooteteabeleht



## Protseduur

1. Avage ajamivedeliku karp. Avage MAGPIX® instrumendi vedelikumahuti ja eemaldage tühi ajamivedeliku pudel ning kõrvaldage see vastavalt nõuetele.
2. Libistage uus ajamivedeliku pudel sisse, seejärel hoidke pudelit ning võtke tihendiosast tugevalt kinni ja eemaldage pitsat.
3. Võtke ajamivedeliku toru vedelikumahutist välja ning sisestage kork hoolikalt ajamivedeliku pudeli avale, tagades toru suuna pudeli süvendist otse alla.
4. Asetage ajamivedeliku pudel kambri sees paika. Pudel peab mahtuma aluse süvenditesse. Veenduge, et prügikast on tühi.
5. Seadke üksus kasutusjuhendit järgides töökorra.

Soovi korral on toote teabelehed saadaval ka teistes keeltes. Küsimuste korral võtke ühendust Luminex tehniliste toega või külastage veebilehte <http://www.luminexcorp.com>. Seejärel kasutage soovitud toote teabelehe leidmiseks otsingufunktsiooni. MAGPIX Drive Fluid nõuetekohaseks kasutamiseks tutvuge kasutusjuhendiga.


**IVD** In Vitro diagnostiliseks kasutamiseks.  
89-60000-00-195, väljaanne A  
6/2020

Translated from English document  
89-60000-00-084 Rev B

**REF** Toote number: MPXDF-4PK-1  
Kogus: 4 x 700 ml

Toote juurde tellimiseks:  
E-posti aadress: [orders@luminexcorp.com](mailto:orders@luminexcorp.com)  
Faks: 512-219-0544

© 2010–2020 Luminex Corporation

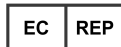

WMDE B.V.  
Bergerweg 18  
6085 AT Horn  
Madalmaad

## Tehnilised tugiteenused

Telefon: 512-381-4397  
Põhja-Ameerika (maksuvaba): 1-877-785-2323  
Rahvusvaheline (maksuvaba): + 800-2939-4959  
E-posti aadress: [support@luminexcorp.com](mailto:support@luminexcorp.com)  
[www.luminexcorp.com](http://www.luminexcorp.com)



**Luminex Corporation**

12212 Technology Blvd.  
Austin, TX 78727  
U.S.A.